

INSTRUÇÕES

**Passo 1:**
Contate-nos

Solicite o kit para a Unidade mais próxima de você:

Unidade São Paulo: solicitakits@igenomix.com Unidade Recife: labrecife@igenomix.com Unidade Porto Alegre: labpoa@igenomix.com

**Passo 2:**
Recebimento do kit**O Kit contém:**

- 2 Tubos de Heparina sódica - tampa verde (verifique a data de validade)
- Envelope bolha contendo papel absorvente (embalagem secundária)
- Formulário de Requisição de Teste e Termo de Consentimento

Armazene o kit em uma temperatura entre 15 e 30 ° C até o uso.

NOTAS:

Caso a data de validade do Kit tenha expirado e / ou o recipiente estiver danificado, entre em contato com a Igenomix para receber um novo kit.

Qualquer incidente grave que possa ocorrer em relação aos materiais incluídos no kit fornecido deve ser relatado à Igenomix (ver detalhes de contato na seção INFORMAÇÕES ADICIONAIS), bem como à autoridade de saúde competente do Estado em que se encontra o usuário e/ou paciente.

**Passo 3:**
Coleta da amostra**Notas importantes:****Preparo do paciente:**

- Não é necessário jejum para a realização do teste.

Fornecimento de dados:

- Se aplicável à paciente, certifique-se de nos informar sobre: 1) Transplante de medula óssea; 2) Transfusão sanguínea (<60 dias); 3) Quimerismo congênito ou adquirido.

Os seguintes casos podem levar a rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas pelas documentações (Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento).
- Documentações (Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento) não preenchidos corretamente.
- Falta de dados obrigatórios, identificados no formulário com um asterisco (*).
- Ausência de assinatura do paciente e/ou médico no Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento.
- Amostras de sangue hemolisada ou coagulada ou volume <7 mL ou fora das especificações de qualidade.
- Tubo danificado e/ou não identificado e/ou validade vencida e/ou contendo outro tipo de conservante que não seja heparina.

Como coletar a amostra:

- Coletar entre 7 ml (mínimo) e 10 ml (máximo) de sangue periférico no tubo de heparina.

Nota: Recomendamos coleta com sistema Scalp à vácuo.

- Após a coleta de sangue, misture imediatamente o conteúdo invertendo suavemente de 8 a 10 vezes.

Após a coleta de tecidos e de sangue:

Etiquetar o tubo com dois identificadores:

Nome completo do paciente (sem abreviações) + data de nascimento (dd/mm/aaaa).

INSTRUÇÕES



Passo 4:

Acondicionamento e embalagem da amostra

- Acondicionar a amostra refrigerada (2 a 8°C) até o transporte. Tempo de estabilidade após a coleta até a chegada na Igenomix é de 24 horas. Se exceder o tempo de estabilidade, ao chegar na Igenomix a amostra será rejeitada.
- Após a coleta da amostra colocar o tubo de heparina dentro do envelope bolha, lacrar para proteger contra vazamento de líquido. Introduzir dentro da caixa rígida (embalagem terciária) para o transporte.
- Introduzir o Formulário de Requisição e o Termo de Consentimento, devidamente preenchidos e assinados, dentro da caixa de transporte sem que haja contato direto com a amostra.
- Enviar a amostra refrigerada (2° a 8°C). Não é recomendado o transporte em temperatura ambiente e nunca congelado.
- Inclua barra de gelo reciclável na embalagem de transporte sem que haja contato direto com a amostra para evitar o congelamento, se a temperatura ambiente exceder 35°C. Para mais detalhes, por favor, contate nosso Departamento de Logística.



Passo 5:

Transporte da amostra

Solicite a retirada da amostra:

 logisticabrasil@igenomix.com

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.

- **O horário de recebimento para processamento deste teste:**

Unidade São Paulo: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs, sábado das 09:00 às 12:00 hs.

Unidade Recife e Porto Alegre: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Feriados podem causar interrupções no serviço.

- Caso possua acordo de transporte com a Igenomix, realizar o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência a coleta. Atenção aos feriados!

- Quando optar pelo transporte através de Correios, seguir as instruções da agência do local.



Passo 6:

Resultados dos testes

O médico solicitante receberá o resultado por e-mail. O prazo do laudo dependerá do tipo de análise solicitada no formulário de requisição e iniciará a partir da data de recepção da amostra e documentação. Para mais informações acessar o nosso site www.igenomix.com.br.



Informações adicionais

Para qualquer dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima

 **São Paulo**
(11) 31975846

Av. República do Líbano nº 500,
Ibirapuera, São Paulo/SP,
04502-000

 **Recife**
(81) 40420057

Av. República do Líbano nº 251,
15º andar sala 1515, Pina,
Recife/PE, 51110-160

 **Porto Alegre**
(51) 35000876

Rua Gomes Jardim nº 201, 9º
andar sala 911 e 912, Santana,
Porto Alegre/RS, CEP 90620-130