

INSTRUÇÕES

O uso pretendido deste kit é a coleta e preservação da amostra para processamento de teste genético. Estas instruções destinam-se ao profissional de saúde que realizará a coleta do material biológico.



Passo 1: Contate-nos

Solicite o kit para a Unidade mais próxima de você:

Unidade São Paulo: solicitakits@igenomix.com Unidade Recife: labrecife@igenomix.com Unidade Porto Alegre: labpoa@igenomix.com



Passo 2: Recebimento do kit

Verifique o kit e certifique-se de que ele contém:

- Um cartão de papel filtro para coleta de sangue QIAcard Bloodstain
- Formulário de Requisição do Teste e Termo de Consentimento
- Saco zip para risco biológico (Biohazard)

Armazene o kit em temperatura ambiente até o uso

Nota: Lave as mãos antes de abrir o kit. Preferencialmente use luvas esteréis para evitar contaminação. Caso o prazo de validade dos swabs bucais tenha expirado e/ou a embalagem tenha sido danificada de qualquer forma que a esterilidade possa ser comprometida, descarte de acordo com a legislação local. Em seguida, entre em contato com a Igenomix para receber um novo kit.

Nota 2: Não descarte a caixa de papelão do kit. Após a coleta da amostra, esta caixa será utilizada para enviar a amostra à Igenomix



Passo 3: Coleta da amostra

Os seguintes casos podem levar a rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas pelas documentações requisitadas:
 - Formulário de requisição do teste
 - Termo de consentimento
- Documentações requisitadas não preenchidas corretamente:
 - Falta de dados obrigatórios, identificados no formulário com um asterisco (*).
 - Ausência de assinatura dos responsáveis legais pelo paciente e/ou médico solicitante no formulário de requisição do teste e/ou no termo de consentimento.
 - Amostra danificada e/ou não identificado e/ou fora do prazo de validade.

Por gentileza, observe o seguinte:


- Preencha os círculos completamente. É preferível ter dois círculos completos do que quatro incompletos.
- Aplique apenas uma gota de sangue por círculo.
- Não pressione o papel de filtro contra a área da punção.
- Não aplique muita pressão na área da punção. Isso evitará a hemólise e a coleta de outros fluidos teciduais.
- Não toque nas manchas de sangue no cartão do filtro com as mãos ou qualquer outro objeto.

Como coletar a amostra:

1. Aplique uma leve pressão ao redor da área da punção para aumentar o fluxo sanguíneo.

Área de punção recomendada: calcanhar para recém-nascido e dedo anelar para crianças e adultos.

2. Segure o cartão de coleta de sangue pelas bordas e coloque a gota de sangue no meio do primeiro círculo, preenchendo a área, conforme mostrado na imagem abaixo.

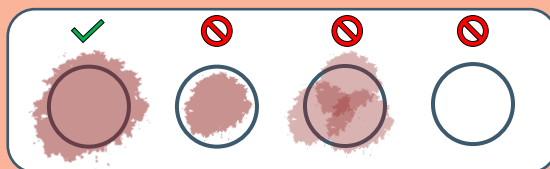

3. Repita o processo por mais três vezes, até que todos os quatro círculos estejam completamente preenchidos.

4. Deixe o cartão secar à temperatura ambiente por, pelo menos, 3-4 horas em posição horizontal. Identifique a amostra dois identificadores:

Nome completo do paciente (sem abreviações) + data de nascimento (dd/mm/aaaa).

5. Depois que a amostra estiver seca, coloque o cartão no saco zip marcado como Biohazard. Em seguida, e coloque-o na caixa do kit, junto aos formulários preenchidos e assinados (sem que esses entrem em contato direto com a amostra).

INSTRUÇÕES



Passo 4: Acondicionamento e embalagem da amostra

- Acondicionar a amostra em temperatura ambiente até o transporte. Tempo de estabilidade após a coleta é de 30 dias. NÃO congele nem guarde no refrigerador. É aconselhável enviar a amostra o mais rápido possível.
- Após a coleta da amostra, colocar o cartão de coleta dentro do saco zip para risco biológico e lacrar. Introduzir na caixa rígida do kit para o transporte.
- Introduzir o Formulário de Requisição e o Termo de Consentimento, devidamente preenchidos e assinados, dentro da caixa de transporte sem que haja contato direto com a amostra.
- **Enviar a amostra em temperatura ambiente.**
- Recomendamos que as amostras sejam devolvidas no kit fornecido pela Igenomix. Se, por qualquer motivo, tiver sido descartado, entre em contato com o Departamento de logística antes de prosseguir.



Passo 5: Transporte da amostra

Solicite a retirada da amostra:

 logisticabrasil@igenomix.com

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.

- **O horário de recebimento para processamento deste teste:**

Unidade São Paulo: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs, sábado das 09:00 às 12:00 hs.

Unidade Recife e Porto Alegre: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Feriados podem causar interrupções no serviço.

- Caso possua acordo de transporte com a Igenomix, realizar o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência a coleta. Atenção aos feriados!

- Quando optar pelo transporte através de Correios, seguir as instruções da agência do local.



Passo 6: Resultados dos testes

O cliente receberá o resultado no prazo estabelecido para o teste solicitado a partir da recepção das amostras na Igenomix. Para mais informações acessar o nosso site www.igenomix.com.br.



Informações adicionais

Para qualquer dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima

 **São Paulo**
(11) 31975846

Av. República do Líbano nº 500,
Ibirapuera, São Paulo/SP,
04502-000

 **Recife**
(81) 40420057

Av. República do Líbano nº 251,
15º andar sala 1515, Pina,
Recife/PE, 51110-160

 **Porto Alegre**
(51) 35000876

Rua Gomes Jardim nº 201, 9º
andar sala 911 e 912, Santana,
Porto Alegre/RS, CEP 90620-130