

INSTRUÇÕES

O uso pretendido deste kit é a coleta e preservação da amostra para processamento de teste genético. Estas instruções destinam-se ao profissional de saúde que realizará a coleta do material biológico.

Passo 1: **Contate-nos**

Solicite o kit para a Unidade mais próxima de você:

Unidade São Paulo: solicitakits@igenomix.com Unidade Recife: labrecife@igenomix.com Unidade Porto Alegre: labpoa@igenomix.com

Passo 2: **Recebimento do kit**

O Kit contém:

- 1 swab bucal (Verificar data de validade do fabricante)
- Envelope Bolha (recipiente secundário).
- Saco zip para risco biológico.
- Formulário de requisição do Teste e Termo de consentimento.

Armazene o kit em temperatura ambiente até o uso

Nota: Lave as mãos antes de abrir o kit. Preferencialmente use luvas esteréis para evitar contaminação. Caso o prazo de validade dos swabs bucais tenha expirado e/ou a embalagem tenha sido danificada de qualquer forma que a esterilidade possa ser comprometida, descarte de acordo com a legislação local. Em seguida, entre em contato com a Igenomix para receber um novo kit.

Nota 2: Não descarte a caixa de papelão do kit. Após a coleta da amostra, esta caixa será utilizada para enviar a amostra à Igenomix.

Passo 3: **Coleta da amostra**

Notas importantes:

Recomenda-se colher a amostra no mínimo 30 minutos após a última alimentação.

Risco de asfixia

- É necessário ter cuidado ao introduzir o swab na boca do paciente.
- Se o líquido entrar em contato com os olhos ou com a pele, lave-os com água.
- Consulte os dados de segurança do swab bucal no site www.dnagenotek.com.

Os seguintes casos podem levar a rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas pelas documentações requisitadas:
- Formulário de requisição do teste
- Termo de consentimento

Documentações requisitadas não preenchidas corretamente:

- Falta de dados obrigatórios, identificados no formulário com um asterisco (*).
- Ausência de assinatura dos responsáveis legais pelo paciente e/ou médico solicitante no formulário de requisição do teste e/ou no termo de consentimento.
- Tubo danificado e/ou não identificado e/ou fora do prazo de validade.

Como coletar a amostra:

1. Higienize as mãos e abra o tubo do swab bucal, sem tocar na parte de algodão. Posicione o swab confortavelmente na boca e esfregue a gengiva inferior **10 vezes com movimentos para trás e para frente.** (Figura 1)
2. Repita o esfregaço no lado oposto da boca, seguindo a instrução anterior. (Figura 2)
3. Após o esfregaço, mantenha o tubo em posição vertical para evitar o derramamento do líquido conservante e desenrosque o swab, sem tocar na parte de algodão. (Figura 3)
4. Insira o swab dentro da solução do tubo e feche-o completamente. (Figura 4)
5. Com o tubo devidamente fechado, inverta-o e agite vigorosamente por 15 vezes. (Figura 5)
6. Repita todo o processo utilizando o segundo swab bucal



Após a coleta:

Etiquetar os tubos com dois identificadores:

Nome completo do paciente (sem abreviações) + data de nascimento (dd/mm/aaaa).

Proteja os tubos com as embalagens recebidas e coloque-os na caixa com os formulários preenchidos e assinados.

Clique aqui, aponte sua câmera ou acesse o vídeo instrutivo de coleta em: igenomix.com.br/como-enviar-amostra/



INSTRUÇÕES



Passo 4:

Acondicionamento e embalagem da amostra

- Acondicionar a amostra em temperatura ambiente até o transporte. Tempo de estabilidade após a coleta é de 30 dias. NÃO congele nem guarde no refrigerador. É aconselhável enviar a amostra o mais rápido possível.
- Após a coleta da amostra colocar os tubos dentro do saco zip para risco biológico, lacrar para proteger contra vazamento de líquido. Introduzir na caixa rígida do kit para o transporte.
- Introduzir o Formulário de Requisição e o Termo de Consentimento, devidamente preenchidos e assinados, dentro da caixa de transporte sem que haja contato direto com a amostra.
- Enviar a amostra em temperatura ambiente (não congelar).
- Recomendamos que as amostras sejam devolvidas no kit fornecido pela Igenomix. Se, por qualquer motivo, tiver sido descartado, entre em contato com o Departamento de logística antes de prosseguir.
- Inclua barra de gelo reciclável na embalagem de transporte sem que haja contato direto com a amostra para evitar o congelamento, se a temperatura ambiente exceder 35°C. Para mais detalhes, por favor, contate nosso Departamento de Logística.



Passo 5:

Transporte da amostra

Solicite a retirada da amostra:

 logisticabrasil@igenomix.com

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.

- **O horário de recebimento para processamento deste teste:**

Unidade São Paulo: segunda à quinta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Outras unidades: segunda à quinta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Feriados podem causar interrupções no serviço. No caso de qualquer interrupção, a Igenomix comunicará no momento do agendamento.

- Caso possua acordo de transporte com a Igenomix, realizar o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência a coleta. Atenção aos feriados!



Passo 6:

Resultados dos testes

O cliente receberá o resultado no prazo estabelecido para o teste solicitado a partir da recepção das amostras na Igenomix. Para mais informações acessar o nosso site www.igenomix.com.br.



Informações adicionais

Para qualquer dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima

 **São Paulo**
(11) 31975846

Av. República do Líbano nº 500,
Ibirapuera, São Paulo/SP,
04502-000

 **Recife**
(81) 40420057

Av. República do Líbano nº 251,
15º andar sala 1515, Pina,
Recife/PE, 51110-160

 **Porto Alegre**
(51) 35000876

Rua Gomes Jardim nº 201, 9º
andar sala 911 e 912, Santana,
Porto Alegre/RS, CEP 90620-130